


Algold Simplifire Laserpin

● Kent u de veelzijdige gebruiksmogelijkheden van Simplifire laserpin al?

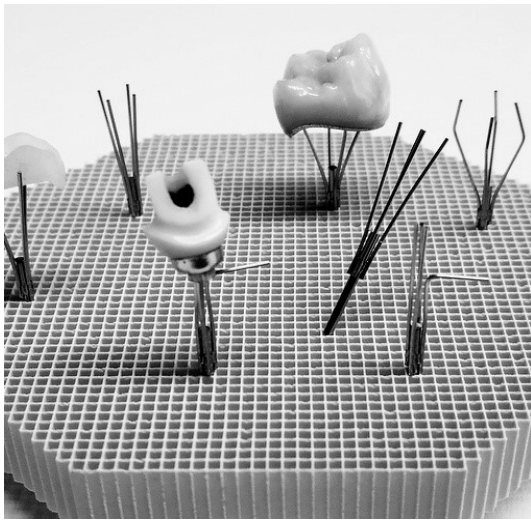

- Het Simplifire branddrager systeem is het meest veelzijdige branddragersysteem dat u kunt vinden. Voor elke indicatie, hoe moeilijk ook, bieden de paraplu-pinnen de perfecte basis.
- Metaalkeramiek, zirkonium, facings, het maakt niet uit. Elke paraplu-pin heeft in een handomdraai de ideale vorm voor de kroon die u op moet bakken.
- De 0.4 mm dunne pinnen geleiden nauwelijks warmte en koelen snel weer af

- Voor molaren en pre-molaren buigt u de 4 pinnen eerst gelijkmatig naar buiten. Buig vervolgens de pinnen op 1/3 (of lager als het voor een kleinere pre-molaar is) van de uiteinden weer terug naar binnen.
- Is er sprake van een lastig geval, bijvoorbeeld een heel erg korte klinische kroon, maak dan een driepoot door 2 pinnen weer tegen elkaar aan te knijpen. Een kroon op een driepoot wiebelt nooit!
- Voor frontelementen en facings knijpt u eerst de 4 pinnen tegen elkaar aan. Buig daarna 1 pin op ongeveer de helft in een hoek van 90° naar buiten. U heeft dan de best denkbare grip.
- Een inlay of onlay legt u tussen de 4 pinnen, zoals op de afbeelding hiernaast

